

# 適正使用のお願い

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会



ご購入いただきました家庭用電気マッサージ器、及び既にお持ちの家庭用電気マッサージ器は、取扱説明書のとおり正しく使用していただくとともに、特に次の事項を守ってください。


## 警告

●家庭用電気マッサージ器のカバー（布・革など）を外したり、修理や改造を行ったり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

また、本体カバー（布・革など）に破れがある場合は、使用を中止し、必ず修理に出してください。

※衣服や髪が巻き込まれることによる死亡や事故が報告されております。

（主な種類）

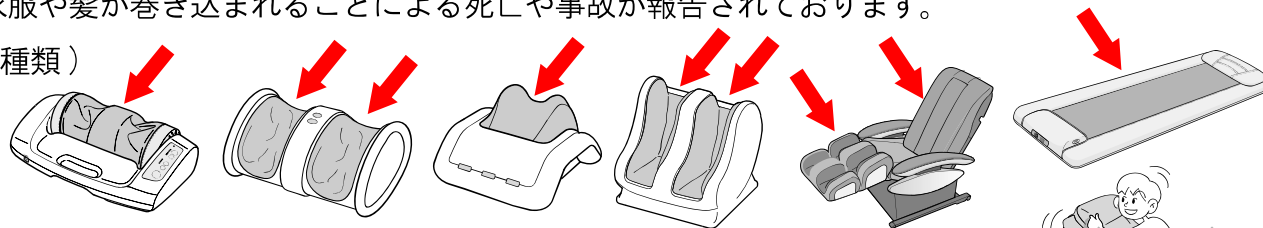

●お子様を家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。


また、使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。

※転倒や本体に挟まることによる事故が報告されております。

製品や修理に関するお問い合わせにつきましては、販売店あるいは製造元にお問い合わせください。




【ローラー式マッサージ器でのお願い】

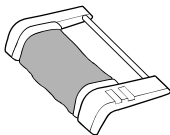


## 危険

カバー（布・革など）を取り外した状態で作動させると、衣服やネックレスなどの装身具などが巻き込んで窒息する恐れがあり非常に危険ですので、絶対に使用しないでください。

※衣服が巻き込まれて窒息死する死亡事故が報告されております。

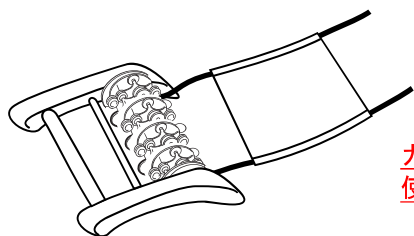

カバーを外して  
使用禁止

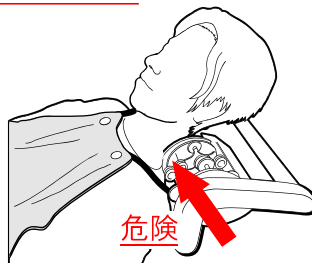

危険



衣服等を巻き込み  
窒息する恐れあり

該当する製品に関するお問い合わせにつきましては、ご購入された販売店あるいは製造元にお問い合わせください。

本紙は、ローラー式マッサージ器の誤使用による事故に対する厚生労働省の通知を受けて（一社）日本ホームヘルス機器協会が作成したものです。

この紙面についてのお問い合わせは、

（一社）日本ホームヘルス機器協会 ☎0120-744-714（平日 9:00～17:00）にお問い合わせください。

<http://www.hapi.or.jp/>